

Kit de frotis nasal


Recolección de muestras e instrucciones de envío

Componentes del kit:


1. Hisopo flocado
2. Medio de transporte viral
3. Etiqueta de la muestra
4. Bolsa de transporte de la muestra
5. Formulario de solicitud del test (TRF) - situado en el bolsillo externo de la bolsa de transporte



PASO 1

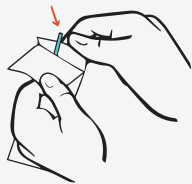


Abra el envase por la parte marcada con la flecha y retire el hisopo.

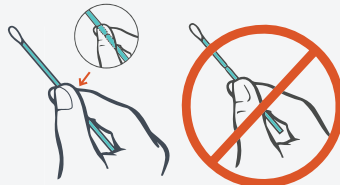


Sujete el hisopo por la parte de en medio. No sujete el hisopo por debajo de la línea de ruptura.

PASO 2

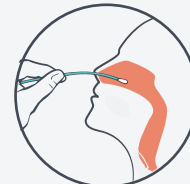

Inserte suavemente el hisopo en la cavidad nasal (menos de 1 pulgada dentro de la fosa nasal). Gire el hisopo durante 3-5 segundos contra la pared nasal. Repita en el otro orificio nasal con el mismo hisopo.


PASO 3

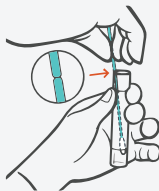

Inserte el hisopo dentro del tubo con medio de transporte viral.



Doble el hisopo con cuidado y rómpalo por la mitad por la línea indicada.

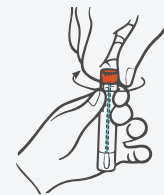

NO ENROSQUE DEMASIADO EL TAPÓN.

Asegúrese de que no haya fugas en el tubo antes de enviarlo.


Enrosque el tapón sellando el tubo de forma segura.

PASO 4



Las muestras **deben** ser etiquetadas con lo siguiente (el kit incluye una etiqueta opcional):

- Dos datos de identificación del paciente - Nombre y apellido del paciente **y** fecha de nacimiento o número de registro médico (MRN).
- Fecha de recolección de la muestra.

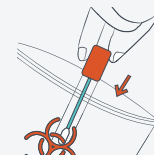

Inserte el tubo en la bolsa de transporte de la muestra y séllela.

PASO 5



- Complete el formulario de solicitud de test (TRF) para cada muestra.
- Inserte toda la documentación en el bolsillo exterior de la bolsa de transporte.
- La documentación **NO** debe ser incluida dentro de la bolsa de transporte con la muestra.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO Y ALMACENAJE

- Mantenga las muestras refrigeradas (2-8° Celsius) o preferiblemente en bolsas de gel congelado antes de hacer el envío.
- Las muestras deben ser enviadas dentro de 72 horas después de recolectarlas. (preferiblemente en 24 horas).
- Envíe las muestras con bolsas de gel congelado (preferiblemente).